

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号：100220
作業年月日	平成 27 年 3 月 11 日	作業時間：Hr
顧客名	宇都宮セントラルクリニック	TEL：028-657-7300
所在地	栃木県宇都宮市屋板町561-3	担当様
販売店		担当様
納入年月日	平成 23 年 3 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期交換の案内表示

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 358
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ ネジ増し締め	殺菌チューブ類	正常 ☒ スターターへの交換
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐ 交換済み

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

殺菌剤（金銀）が化あり。(CA-503S/A・CA-503B/G) ←

装置 情報	交換後運転回数：1536	更新（リット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌：8539	殺菌+7L：800
	リークチェック：0	自己洗浄：7/1	7Lアルコール単独：12	エア単独：5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 3 月 11 日

ご署名 久保田 理子



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

