

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 07月 19日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 7 月 19 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	聖路加国際病院 口腔外来 TEL: 03-3541-5151
所在地	東京都中央区明石町9-1 ご担当 高橋 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100149	運転回数: 793	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴		 	
・ ドア開閉ワイヤー切れによりドアが開きっぱなしの状態になる			
原因			
・ ドアワイヤーとローラーの適合が適切でなくワイヤーが摩耗し破損した			
処置、作業内容			
① ドア開閉対策部品に交換		清掃前	清掃後
② メインプログラム、タッチパネルプログラム書換			
③ 定期保守点検済み			
特記事項			
※ 温水の給水接続部のストレーナーに目詰まりがひどく施設の温水給水関係の確認が必要と思われます。分解清掃済み（上記			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1セット	—	
2	メインプログラム書換			—	
3	タッチパネル書換			—	
4	DPIチューブ交換		1セット	保守点検に含みます	
5	ドアパッキン交換		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒104-8560 東京都中央区明石町9-1
聖路加国際病院
 電話 03-3541-5151 番
 ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野 '18/07/19	桐野 '18/07/19

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称 聖路加国際病院 口腔外来 様	製造番号 100149	点検 実施日 2018年7月18日	ご承認 〒104-8560 東京都中央区明石町9-1 聖路加国際病院 電話 03-3541-5151
	住所 東京都中央区明石町9-1	運転回数 793	点検 実施者 IHIアグリテック 小山	
	納入場所	サービス形態 定期保守点検	モリタ 担当者	

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置


- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

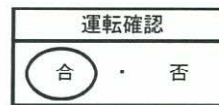

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ DPIチューブ	1
・仕上剤ポンプ DPIチューブ	1
・ドアパッキン一式	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030