

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150303

発行日 平成 27 年 3 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0		製造番号：	100404
作業年月日	平成 2 7 年 3 月 2 日		作業時間：	Hr
顧客名	えばた内科クリニック			

不具合状況、依頼内容	
平成27年1月8日受付 修理伝票: No. 02-44026	
1/7 「光量低下異常」および「ランプ切れ異常」が5回発生。	
1/8 新鋭工業殿が現地確認したところ、正常に動いていた。念のため濃度計を交換し、弊社に点検依頼	
不具合原因、作業内容	
濃度計を点検したところ、異常は再現しませんでした。ランプの一時的な点灯不良と思われます。	
濃度計は1/8に交換済みなので、それ以外の部品を交換し、保守点検および内部清掃を実施しました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 404
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。	

装置情報	交換後運転回数: 164 → 0 更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 8	殺菌+アル: 526
	リークチェック: 2	自己洗浄: 662	アルコール単独: 1
			エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1 本
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
工場点検につき不要です		
ご署名		印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者