

えはら内科クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 角田

点検年月日	平成27年 4月 17 日	機種名	ONW-10	製造機番	001393
設置場所				TEL	0276-60-330
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.6 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 91.7% 流量: 0.8 L/min 圧力: 0.103~0.179 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

27 年 4 月 17 日

ご署名 江原 浩三

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシパウラ
環境事業部

日付: 2015. 4. 17

作業者 角田

ONW-10機番: 001343

PSA機番: SPS-

客先: えはら内科クリニック

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	☒ 否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	☒ 否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	☒ 否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	☒ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	☒ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	☒ 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか	合/否	☒ 否
酸素濃度の確認 (運転開始から約5分後) (90%以上) (91.7 %)	合/否	☒ 否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.8 L/min)	合/否	☒ 否
PSA圧力の確認 (0.103 Mpa) ~ (0.197 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	☒ 否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	☒ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	☒ 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	☒ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	☒ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)	合/否	☒ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	☒ 否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	☒ 否
確認試験		
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	☒ 否
オゾン水濃度の確認 (0.3mg/L以上)	合/否	☒ 否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	☒ 否
インジケータの変色は良好か	合/否	☒ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

この用紙は作業者の控え。
客先には点検確認書のコピーを渡すこと