

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号 02-44534 No. 150526

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------|-----|------------|
| 配布先 | 納入先 | 新鋭工業(株) 東京支店 殿 | | 機種 | ONW-10 |
| 客先 | 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町小野寺 2575-7 | | 機番 | 000929 |
| 環営 | ユーザー名 | 江田クリニック 様 | | 納入日 | 平成17年9月20日 |
| 防品 | 点検者 | 中澤一裕 | 作業時間 | 受付日 | 平成27年2月19日 |
| | 返送先 | 納入先と同じ | | 発送日 | 平成27年5月25日 |
| 計 | | | | | |

修理依頼・不具合内容

オーバーホール依頼

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

点検中に「給水量不足」異常が発生し、水位センサーの劣化が原因と判明しました。
この部品の他に、性能劣化した部品を交換しました。

写真1 : 交換部品 No1~6

写真2 : 交換部品 No7~10



[2] 修理・点検内容

- 部品交換 : 下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定 : 0.41~0.57mg/L ・ ・ 正常
- PSA (酸素発生装置) 性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度 : 93.2% 酸素流量 : 0.81L/min 圧力 : 0.097~0.159MPa (AC100V, 50Hz)
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

交換部品

| 承認 | No. | 部品名称 | 数量 | 備考 |
|-------------------|-----|-------------------|----|-----------------|
| 安 15.5.26 田 | 1 | オゾン発生装置 | 1式 | |
| | 2 | オゾン水製造ポンプ (P-1) | 1台 | |
| 審査 | 3 | 内視鏡洗浄ポンプ (P-2) | 1台 | |
| | 4 | 排水ポンプ (P-3) | 1台 | |
| 中 27.5.26 澤 | 5 | オゾンセンサー | 1個 | |
| | 6 | 水位レベルセンサー | 3本 | |
| 作成 | 7 | 配管チューブ、パッキン | 1式 | 水槽キャップ、タッチシート含む |
| | 8 | エアコンプレッサー | 1台 | |
| H27.5.26 中澤 | 9 | 給水電磁弁 | 2個 | |
| | 10 | PSA ドレン系統電磁弁、フィルタ | 1式 | |