

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0		製造番号：	100195
作業年月日	平成 2 7 年 3 月 2 4 日		作業時間：	6. 0 Hr
顧客名	中央林間病院 様		TEL：	046-275-0110
所在地	神奈川県大和市中央林間4-14-18		担当	若林 様
販売店	様		担当	様
納入年月日	平成 22年 10 月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 なし	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年 7回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	オーバーホール ☒		修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検およびオーバーホール依頼			
不具合原因、作業内容			
ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 376
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。 交換部品の詳細は別紙「100195号 工事写真」をご参照ください。			

装置 情報	交換後運転回数: 1815⇒3	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 7071	殺菌+アル: 4855
	リークチェック: 4723	自己洗浄: 1269	アルコール単独: 75	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	1 式	マニホールド電磁弁		☒	1 式
メインポンプ、排水ポンプ		☒	1 式	酸素、給水電磁弁		☒	1 式
エアポンプ		☒	1 台	アルコールライン電磁弁		☒	1 式
排気ファン		☒	1 台	配管パッキン、フタパッキン		☒	1 式
ドレンバルブ ASSY		☒	1 式	リークチェック配管		☒	1 式

機械受付日: 平成 26年 10月 22日
機械出荷日: 平成 27年 3月 25日

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者

1:交換部品 全体



2:定期交換部品 一式



3:メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ、排気ファン



4:ドレンバルブASSY、配管パッキン、フタパッキン
※リークチェック配管(本体側)は写真なし



5:マニホールド電磁弁、酸素電磁弁
給水電磁弁、アルコールライン電磁弁

