

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|                                                                    |                                                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名                                                                | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S                                                                | 製造番号: 300148                                  |
| 作業年月日                                                              | 平成27年 5 月 20 日                                                                      | 作業時間: 1.522 Hr                                |
| 顧客名                                                                | さいとう新聞機印刷                                                                           | TEL: 048-795-4760                             |
| 所在地                                                                | さいとう印刷区富前町 408-1                                                                    | 担当 874様 109 様                                 |
| 販売店                                                                |                                                                                     | 担当 様                                          |
| 納入年月日                                                              | 2015年 11 月 26 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分                                                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目         | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                         | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

|          |                                        |           |                                                    |
|----------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 消毒槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 消毒チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 消毒槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。給水スリット交換。排水スリットは中味微え。  
PHSホースアンチ設置されました。(オゾン濃度0.012002ppm)107超えず。

|          |               |                                                                              |          |             |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1680 | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | 消毒: 5080 | 消毒+7L: 1545 |
|          | リークチェック: 8    | 自己洗浄: 416                                                                    | 7L単独: 0  | エア単独: 1     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 内視鏡接続コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 吸盤        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

西野