

修理完了報告書

お客様	つがクリニック 様		機種	ONW-10	
所在地	千葉県千葉市若葉区都賀2-24-1 043-214-5560		機番	178	
販売店			納品日	2005年9月8日	
			依頼日	2013年 2月5日	
作業者	山本謙介	作業時間	12h以上	作業日	2013年2月 7日

修理依頼

定期メンテナンスの作業及びアスピレータ、シリコンチューブ交換

処理内容

下記部品の交換を実施致しました。

交換後弊社にて機器を何回か作動させて点検を実施致しました。

作動確認・性能確認実施。

試運転を10回実施。⇒特に異常問題なし。

■備考

オゾン濃度0.50mg/L 酸素濃度94.2% 酸素流量0.80L/min 圧力0.090～0.152MPa

アスピレータ破損部



吸着筒・吸湿筒・ドレンフィルター・オゾン分解触媒



排水用シリコンチューブ



交換推奨部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	ドレンフィルター	1式	
	吸着筒・吸湿筒	1式	
	オゾン分解触媒	1	
	排水用シリコンチューブ	1	
	スピレータ	1	

上記作業すべて終了したことを確認しました。

サイン: 石 燈 謙

御 見 積 書(ONWスポット点検)

つがクリニック 御中

平成23年4月20日

新鋭工業株式会社

本社:埼玉県上尾市平方領領家308-2

東京支店・札幌支店・仙台支店・新潟支店
大阪支店・広島支店・山陰支店・岡山支店東京支店:東京都文京区本郷3-12-5
tel (03)3816-0444 fax (03)3816-0406

ご担当	院長先生 様		
納入期日			
納入場所	つがクリニック 様		
荷造費及び運賃			
御支払方法	岩瀬薬品様より金額請求となります。	担当支店	東京支店
見積有効期間			

担当者 山本 謙介

商品コード	品 名	数 量	単価(税抜)	金 額(税抜)	備考又は税抜定価
-------	-----	-----	--------	---------	----------

件名:内視鏡洗浄器スポット点検

762280810	吸着筒・吸湿筒	1	63,000	63,000	
010409903	オゾン分解触媒・ドレン用フィルター	1	25,000	25,000	
010409999	技術料(取付作業・機器調整・運転確認・清掃)	1	18,000	18,000	
010409999	出向料	1	15,000	15,000	

合計金額

121,000

備考

つがクリニック 御中

平成23年4月20日

本社：埼玉県上尾市平方領領家308-2

東京支店・札幌支店・仙台支店・新潟支店
大阪支店・広島支店・山陰支店・岡山支店

東京支店:東京都文京区本郷3-12-5
tel (03)3816-0444 fax (03)3816-0406

いし おじり
石 呂佐

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 山本

点検年月日	平成 25年 2月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	000178
設置場所				TEL : 043-214-5560	
設置時期	平成 17年 9月 8日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.50	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 :	94.2%	流量 :	0.80 L/min
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☐	調整	☐	交換	☒
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☒		
内部	正常	☐	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	経年による内部機器の劣化が見受けました。耐用年数も超えているので、今後不具合が生じた場合、買替えを推奨致します。
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

25年 2月 13 日			
ご署名 石野 謙			

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

納品書兼請求明細書

〒284-0033 TEL 043-236-7707 FAX 043-485-5242
千葉県四街道市鷹の台1-5

岩淵薬品株式会社 業務部

松井様

御得意先コード 01104-000



最適な提案で医療福祉社会に貢献

新鋭工業株式会社

本社 埼玉県上尾市平方領町308-2 〒362-0055 TEL (048) 725-7700 FAX (048) 725-7550

サイン

東京支店 東京都文京区本郷3-12-5 〒113-0033 TEL (03) 3816-0444 FAX (03) 3816-0406
札幌支店 札幌市東区北七条東4丁目28-3 〒060-0907 TEL (011) 741-7752 FAX (011) 753-2703
新潟支店 新潟市中央区関屋田町1-1 〒951-8136 TEL (025) 233-0592 FAX (025) 233-0573
金沢支店 金沢市西郷1-143-1 〒920-8202 TEL (076) 268-3832 FAX (076) 268-8532
岡山支店 岡山市北区中島町1-7-8 〒700-0982 TEL (086) 235-0323 FAX (086) 235-0324
大阪支店 大阪市中央区今橋1-6-1 〒541-0042 TEL (06) 6228-3311 FAX (06) 6228-3321
仙台支店 仙台市若林区大和町4-9-12 〒984-0042 TEL (022) 782-4661 FAX (022) 782-4662
長野支店 長野県松本市高宮東5番13号 〒390-0835 TEL (0263) 24-2840 FAX (0263) 27-3152
山陰支店 鳥取県米子市哲生温泉2-20-27 〒683-0001 TEL (0859) 34-5675 FAX (0859) 34-5708
広島支店 広島市西区庚午中4-10-36 〒733-0822 TEL (082) 275-0740 FAX (082) 275-0760

御届け先					(9) <御買上伝票>
つがクリニック 様					発行 2013/02/13 No 2-3711527-1
商品コード・商品名	シリアルNo.	数量	単価	金額	貴社注文番号/備考
010400174 吸着筒・吸湿筒		1個	56,700	56,700	定¥63,000
010400052 ONW定期交換部品セット 松本型		1個	22,500	22,500	定¥25,000
000819999 技術料 (取付作業・機器調整・清掃)		1	16,200	16,200	定¥18,000
000819903 出向料		1	13,500	13,500	定¥15,000
000819999 千葉営業所様分		1	0	0	
弊社発送部署 東京支店		非課税合計	課税合計	伝票合計	1 / 1
		0	108,900	108,900	