

みさわクリニック

御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 中村

点検年月日	平成 27 年 6 月 19 日	機種名	ONW-10	製造機番	00/051
設置場所				TEL: 048-662-3305	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 95.1 % 流量: 0.79 L/min 圧力: 0.091~0.162 MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内部	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

27 年 6 月 19 日

ご署名

三澤

三澤

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社Hシバウラ
環境事業部

日付: 平成27年6月19日

作業者 中村

ONW-10機番: 001051

PSA機番: SPS-11797

客先: みさわクリニック

様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10989)	☒ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 否

PSA性能確認

圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(95.1 %) ☒ 否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.79 L/min) ☒ 否
PSA圧力の確認 (0.091 Mpa) ~ (0.162 Mpa)	参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか	☒ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか	☒ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 否

確認試験

オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)