

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100774
作業年月日	平成 27 年 4 月 17 日		作業時間: 約1.5 Hr
顧客名	西大泉呼吸器科内科クリニック		TEL: 03-5905-5300
所在地	東京都練馬区西大泉6-14-11		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 25 年 5 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容 OED-1000定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 425
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 下記定期交換部品の交換。作動点検実施。作動特に問題なし。 異常履歴一度消去しました。			

装置 情報	交換後運転回数: 193 → 0	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 193	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1	E-103 57 本		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		H 27 年 4 月 17 日	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 相馬美知恵 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	

型式	OED-1000
製造番号	100774
プログラム	Ver. 0107/T01.A
納入年月日	13/05/24
前回定期交換日	13/05/24
交換後運転回数	193
運転回数(殺菌)	193
運転回数(殺菌+アル)	0
運転回数(リークチェック)	0
運転回数(自己洗浄)	2
運転回数(アルコール単独)	0
運転回数(エア単独)	1

異常履歴				消去	C
Date	Time	Error			
09/30	08:16	殺菌時給水異常	(E:202)		0
10/09	07:56	殺菌槽異常	(E:101)		0
10/21	08:22	排水異常1	(E:401)		0
11/08	08:14	排水異常1	(E:401)		0
11/08	08:21	排水異常2	(E:402)		0
11/12	08:03	水位低下異常	(E:300)		0
11/12	08:26	殺菌時給水異常	(E:202)		0
03/04	07:51	排水異常2	(E:402)		0
04/16	08:05	排水異常1	(E:401)		0
04/16	08:11	排水異常2	(E:402)		0

