

社会福祉法人 上 宮 会

日暮里上宮病院

かんばやし ごう
総 務 課 上 林 岡

URL <http://www.jyogu.com/nippori/>

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2-29-8
TEL:03-3891-5291(代) FAX:03-3891-5292
E-mail:nippori@jyogu.com

—— 經 営 事 業 ——

日 暮 里 上 宮 病 院	(0 3) 3 8 9 1 - 5 2 9 1
清瀬リハビリテーション病院	(0 4 2) 4 9 3 - 6 1 1 1
特別養護老人ホーム 上宮園	(0 4 2) 4 9 3 - 6 1 1 8
サ ン ハ イ ム 荒 川	(0 3) 3 8 0 5 - 7 5 2 5
さ くら 上 宮 保 育 園	(0 3) 5 4 5 8 - 5 2 0 0
広 尾 上 宮 保 育 園	(0 3) 3 4 0 7 - 9 0 4 2
清 瀬 上 宮 保 育 園	(0 4 2) 4 9 2 - 4 0 1 5

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 西野

点検年月日	平成 27年 5月 13日	機種名	ONW-10B	製造機番	001683
設置場所				TEL03-3891-5291	
設置時期	平成 21年 10月 19日	使用時間	271	御対応者	上林 様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水		☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☐	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	流量：	0.72 L/min ~
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒 吸盤	交換 ☒	一個 3コ	交換品使用頂いて可。 E18 取付けしオゾン分解触媒、念のため 排水ホースの調整(位置)を致した。 洗浄コネクタの調整を致した。 オゾン分解触媒を固定。

年 月 日

ご署名 上林 周子

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。