

さくま内科胃腸科クリニック 御中

本社:埼玉県上尾市平方領領家308-2

東京支店・札幌支店・仙台支店・新潟支店
大阪支店・広島支店・山陰支店・岡山支店

東京支店:東京都文京区本郷3-12-5
tel (03)3816-0444 fax (03)3816-0406

[illegible]

備考	1.本見積には消費税は含まれておりません。 2.新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。 3.本製品は平成21年8月に製造販売を終了しており、修理対応期間は平成28年8月までとさせていただきます。 何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
----	---

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

平成 年 月 日

ご署名

佐久間 美代枝



TEL

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 西野

点検年月日	平成 27年 7月 21日	機種名	ONW-10	製造機番	001800
設置場所				TEL	0276-55-2500
設置時期	平成 21年 9月 16日	使用時間	3002 回	御対応者	海老沼様

(1485)

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：	92 %	流量：	0.78 L/min
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☒	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	一式	
吸湿筒	交換	☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換	☒	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	
吸盤	交換	☒	3個	
	交換	☐		

年 月 日

ご署名 佐々間 美代枝

印

※：本点検によって知り得た個人情報とは、他の目的では使用いたしません。

さくま内科胃腸科クリニック

医学博士 佐久間 敦

〒374-0005 群馬県館林市花山町 2576-4
TEL 0276-55-2500 FAX 0276-55-2501

- ・肝臓専門医
- ・消化器内視鏡専門医
- ・消化器病専門医
- ・外科専門医
- ・獨協医科大学 第二外科 非常勤講師