

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300061	
作業年月日	平成 27 年 6 月 5 日	作業時間:	2 1.5 Hr	
顧客名	聖心会 十全病院	TEL:	048-964-7377	
所在地	埼玉県越谷市赤山町5-10-18	担当	様	
販売店	株式会社 ムトウ	担当	様	
納入年月日	平成 25 年 8 月 22 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水注意 (E:111) 点検 5/23 ~

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

排水注意 (E:111) 点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 577
オゾンセンサ	正常 ☒ 0.21	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水注意 (E:111) 点検したら、排水注意 (E:111) 点検が必要となります。(別途書面)
本件には異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数:	987	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	287	殺菌+7L:	1496
	リークチェック:	0	自己洗浄:	38	7L単独:	81	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	吸盤		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	排水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 6 月 5 日

ご署名

斉藤節子



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者



医療法人社団

聖心会 十全病院

事務長

石川

優

〒
343-
0807

埼玉県越谷市赤山町五丁目十番十八号

TEL (048) 964 737 番

FAX (048) 964 164 番

URL <http://www.jyu-zen-byouin.jp>