

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

モリタ用

お客様 お名様	名称	澤田デントオフィス	製造番号	13100055	点検実施日	2016年2月15日	モリタ 承認印
	住所	新潟県四谷1-18 新野ビル	送電時間	1155回	点検実施者	星住	
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック調整ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセッ増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ *清掃*

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損 *清掃*
- ☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度 -81.9kPa

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ *清掃*
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接触確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基礎傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ *交換*
- ☒ エアフィルター・のつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)		数量
ドアパッキン		1
給水タンクフィルター 取付		1
BMS-Test STEAM		



株式会社HIEI

機械事業本部営業部 営業サービス

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地1-20-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030

D 作業報告書

お得意様	澤田レンタルオフィス 様		
住所	新宿区四谷1-18 錦半野原ビル 別館1階		
T E L	03-3341-4618	署名	区長 様
機種型式	オートクル-7 BC-17	号機	1155 回
運転回数	1155 回		
継続	有	無料	製番 13100055
取扱業者名	(株)エムシーサービス 様		
ご担当者	東京、小島、廣瀬 様		

ご依頼内容・現象

定期保守点検 1年目

原因

処置

点検表に基づく各部の点検。
消耗部品の交換。
B D テスト実施。
I

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

購の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 2 月 15 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検	4 点検整備	5 点検	9 対象 (摘要√)
サービス形態	1 保守期間	2 ポスト	3 CM	医療機器	3 区分	特 非 特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 フック
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ ー ド 交換部品・機材名称 数量 単 価 金 額

	ドアロック	1		支給部品
	給水タンクフィルター	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No)	
2	技術料	2H× 1 名× 7500円	15,000
3	派遣料	1 名× 円	9,800
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	駐車料等諸経費	3,000
6			

サービスセンター

東京 SC

TEL - -

実施者

星 住

メモ

特記事項

①管理 No. 779520

②作業日 20 16 02 15

③Uコード 0333414618

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 13100055

⑦保守・サービス形態 9-2-40

⑧故障コード 01-502-1

⑨実施 SC 79

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 27,800

⑮

⑯

税別合計金額 27,800

⑰

消費税 2,224

⑱

ご請求金額 30,024

納品書 No. 9443