

オゾンインジケータ 変色結果

ユーザー名:アビコ外科整形外科病院様

製造番号:000586

運転日:平成21年2月5~6日

運転場所:IHIシバウラ岡山事業所

作業者:中澤一裕

インジケータ変色結果:良好でした。



未処理



運転後



報告書記載データ



報告書記載データ

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 090206

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	千葉県我孫子市我孫子264		機番	000586
環営	ユーザ名	アビコ外科整形外科病院 様		納入日	平成16年11月30日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成21年2月3日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成21年2月6日
計	3				

修理依頼・苦情内容

オゾンインジケータの変色が悪い
(昨年1月と6月に同様の現象で現地対応を実施した経緯あり)

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

・オゾンインジケータ

黄色の濃淡によるばらつきの範囲内で異常はありませんでした。
このインジケータを添付しますのでご参照ください。

・酸素発生装置

昨年の現地調査時に「酸素濃度の立ち上がりが遅い」旨、指摘がありましたので
念のためエアコンプレッサを交換しました。

・運転カウンタ:215回

[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定: 2/5 0.45~0.51mg/L 2/6 0.49~0.60mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度: 92.3% 酸素流量: 0.75L/min 圧力: 0.095~0.177Mpa (AC100V、50Hz)
- エアコンプレッサ交換
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
江 21.2.6 口		エアコンプレッサ	1	
審査				
江 21.2.6 口				
作成				
H21.2.6 中澤				

100