

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 02-35070 No. 150924

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	みつはし内科クリニック 様	機番	100209
環営	所在地	千葉県市原市牛久 879-1	納入日	平成 22 年 10 月 5 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成 27 年 7 月 4 日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 27 年 9 月 15 日

修理依頼・不具合内容

タッチパネルが起動しない

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

不具合現象を確認しました。タッチパネルの内部回路(DC-DCコンバータ)が故障して起動しない状態でした。このためお客様の運転データが取り出せませんでした。タッチパネルメーカーに相談しましたが、回路の修理ができないためタッチパネル全体を交換して復旧しました。

写真1:タッチパネル



写真2:定期交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1: 平成27年分保守点検

2: 運転確認・・正常

3: 出荷時の装置情報

交換後運転回数: 4 殺菌: 9、殺菌+アルコール: 1、リークチェック: 2

自己洗浄: 4、アルコール単独: 0、エア単独: 1

—以上—

承認
安 15.9.24 田
審査
中 15.9.24 澤
作成
H27. 9. 24 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 台	
	定期交換部品	1 式	
	オゾン分解触媒、排水栓、水槽コネクタ		オゾン濃度計校正
	オゾン水濃度計用フィルタ		オゾン濃度計校正

(株) I H I シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528