

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150910

発行日 平成 27年 9月 14日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300061
作業年月日	平成 27年 9月 10日		作業時間:	Hr
顧客名	聖心会 十全病院 様		TEL:	048-964-7377
所在地	埼玉県越谷市赤山町5-10-18		担当	様
納入年月日	平成 25年 8月 22日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/5 ~ 9/5 オゾン水生成注量 9回

9/4 ~ 9/10 排水注量 25回

不具合原因、作業内容

排水フィルタの詰まりが原因でした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 院内配管	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒ 3分10秒 → 1分30秒
給水ライン	正常 ☒ 33い	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ 左上とヒビあり	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

次回排水フィルタの並列作業に
伺います。

<従来>



<次回>



装置 情報	交換後運転回数: 358	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 270	消毒+7L: 1831
	リークチェック: 0	自己洗浄: 38	7Lアルコール単独: 82	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
排水フィルタ (新型)		☒	81			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 9 月 10 日

ご署名

廣倉

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者



作業者

H27.9.10

