

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-44538

No. 150819

配布先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	埼玉県越谷市赤山本町7-2			機番	001254
環営	ユーザー名	岡野クリニック 様			納入日	平成18年10月2日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成27年5月27日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成27年8月18日
計	3					

修理依頼・不具合内容

- ・内部清掃依頼
- ・残り時間2分で電源が切れ、その後「18」が点滅する
(これは排水能力が劣化した時に出る現象です)

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水ポンプ、水位センサ、配管が劣化して不具合現象が発生していました。
この部品の他に、性能劣化した部品を交換して復旧しました。

写真1：交換部品 No1～4

写真2：交換部品 No5～7



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.41～0.53mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.105～0.177MPa（AC100V, 50Hz）
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：4458

承認



審査



作成

H27.8.19

中澤

交換部品

No.	部品名称	数量	備考
1	排水ポンプ（P-3）	1台	
2	オゾン水製造ポンプ（P-1）	1台	
3	内視鏡洗浄ポンプ（P-2）	1台	
4	水位レベルセンサー	3本	
5	配管チューブ、パッキン	1個	タッチシート含む
6	エアコンプレッサー	1個	
7	オゾンセンサー	1個	