

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35074

No. 150625

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	東伊興クリニック 様		機番	300419
環営	所在地	東京都足立区東伊興 3-21-3		納入日	平成 26 年 11 月 7 日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 5 月 20 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 6 月 23 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

5/20 2 回目の運転で水漏れ （機械の右側のキャスター部分）

5/20 新鋭工業殿が現場で 2 回運転したが水漏れは再現しなかった。

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

工場で下記の確認をしましたが、水漏れは再現せず、問題ありませんでした。

- 1：目視検査・・・水漏れ跡や水系統の機器に異常が無いか確認する。
- 2：通常運転・・・運転条件（水量、水圧）を振って 15 回運転する。
- 3：検査運転・・・「水漏れ検査」モードで 5 回運転する。
- 4：水密性確認・・・水槽を満水にして 5 日間静置する。

より安心してご使用いただくために、アッパーカバーのパッキンを交換し
水位レベルセンサを交換いたしました。

写真：交換部品一式 パッキン、水位センサ

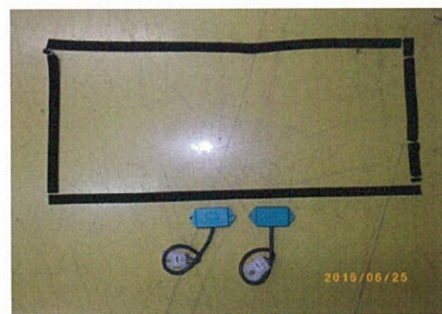

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：運転プログラムバージョンアップ・・・Ver0205⇒0207
濃度計ウォーミングアップ条件を見直しました。
- 3：オゾン水濃度・・・正常 殺菌履歴：0.68ppm（基準：0.5～0.9ppm）
- 4：運転確認・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762822010、762822020	パッキン	1 式	アッパーカバー側
762302500	レベルセンサ ASSY	2 個	H および HH

承認

安
15.6.25
田

審査

中
15.6.25
澤

作成

H27. 6. 25
中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528