

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-44526

No. 151019

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	ONW-10
環営	防品	所在地	千葉県袖ヶ浦市奈良輪 1-8-8	機番	001206
		ユーザー名	袖ヶ浦医院 様	納入日	平成 19 年 5 月 5 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		返送先	納入先と同じ	受付日	平成 27 年 7 月 2 月
計	3			出荷日	平成 27 年 10 月 17 日

修理依頼・苦情内容

インジケータの変色が悪い
定期点検および内部清掃依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

酸素発生装置の性能が低下していたため、インジケータの変色が「要点検」になっていました。
定期交換部品である「吸着筒、吸湿筒」を交換して復旧しました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.44～0.58mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.1% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.082～0.143MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・788 回

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1 式	
	吸着筒、吸湿筒、分解触媒、ドレンフィルタ		SPS-11843
2	排水シリコンチューブ	1 本	
3	水ポンプ出口チューブ	2 本	
4	排水ポンプ入口チューブ	1 本	

（株）IHI シバウラ

承認



審査



作成

H27. 10. 19

中澤