

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 151026

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	ONW-10
環境	防品	所在地	茨城県つくば市竹園 2-8-19	機番	001210
		ユーザー名	竹園ファミリークリニック 様	納入日	平成21年7月27日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		返送先	納入先と同じ	受付日	平成27年6月18日
計	3			出荷日	平成27年10月25日

修理依頼・不具合内容

- ・水漏れ（水槽亀裂）
- ・平成27年分定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄槽底部の亀裂を確認しました。何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
亀裂部分を溶接して復旧しました。（写真をご参照ください）

写真1：水槽亀裂部（黄色テープの部分）

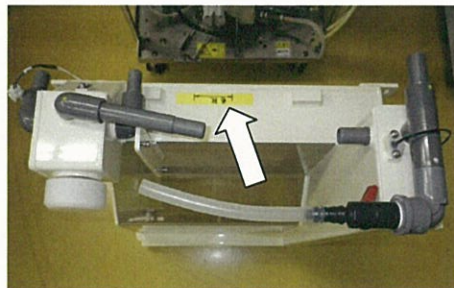


写真2：定期交換部品、配管チューブ



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換（下表および写真をご参照ください）
2. オゾン水濃度測定：0.45～0.60mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.8% 酸素流量：0.77L/min 圧力：0.108～0.177MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常、オゾンインジケータ変色・・・正常
5. 運転カウンタ：1343

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位センサー（LVL、LVH、LVHH）	3本	
	配管チューブ（SV1、P-1）	1式	
	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、フィルタ、分解触媒		

承認

安
751026
田

審査

中
751026
澤

作成

H27.10.26

中澤

（株）IHIシパウラ