

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-54458

No. 151130

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	みずきクリニック 様		機番	100354
環営	所在地	神奈川県平塚市中原 2-15-2		納入日	平成 23 年 3 月 23 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 11 月 25 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 11 月 27 日
計	3				

不具合内容・依頼内容

・水漏れ（多量）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果

機械内部のオゾン水が通るホースに亀裂が発生し、そこから水漏れしていました（写真1）
納入から4年以上で、運転回数が2千回を超えていることから経年劣化と思われます。
周辺のホース、チューブを全て交換して復旧しました。
今後は再発防止のため、早めの交換をさせていただきます。

写真1：水漏れ箇所（矢印の部分）

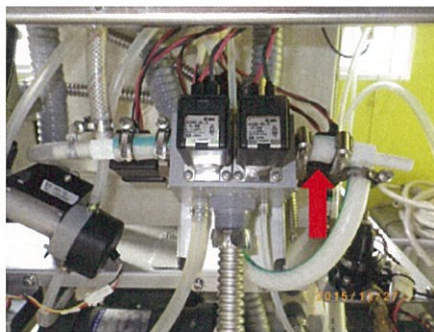


写真2：亀裂（ピンホール）部分の拡大



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・異常に関係する部品を交換しました。下表と写真を参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：装置情報

交換後運転回数：21 殺菌：1938、殺菌＋アルコール：442、リークチェック：1
自己洗浄：124、アルコール単独：5、エア単独：3

承認

審査

作成

H27. 11. 30

中澤

交換部品

部品種類	部品名称	数量	備考
	マニホールド周辺ホース	1 式	
	アルコールタンクキャップ	1 個	

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528