

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-44543

No. 150901

配布先	客先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000
環営	環品	顧客名	今野内科胃腸科医院 様	機番	100679
		所在地	栃木県宇都宮市西川田町 933-1	納入日	平成 25 年 2 月 28 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成 27 年 7 月 27 日	出荷日	平成 27 年 8 月 31 日
計	3	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・不具合内容

- ・タッチパネルのボタンを押しても反応しない
- ・タッチパネルのメッセージで「注意：水温センサの点検が必要です」が出る

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

タッチパネルの動作が停止（フリーズ）することで、下記の現象が発生することを確認しました。
 停止状態・・・ボタンを押しても効かない。起動画面から次の画面に移行しない
 運転状態・・・消毒終了後に「注意：水温センサの点検が必要です」が出る

タッチパネルが故障する前兆と判断し、これに関係する部品を併せて交換しました。
 なお、水温センサは異常ありませんでした。

写真：コントロール基板、タッチパネル



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：水温センサ動作確認・・・正常
- 3：運転プログラムバージョンアップ・・・Ver0105⇒Ver0107
 ※お客様がお使いになる部分で変更はありません。

〔3〕性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.67ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

承認
安 15.9.1 田
審査
中 15.9.1 澤
作成
H27. 9. 1 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 台	
	コントロール基板	1 枚	

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528