

点検確認書

点検担当者：

西野



点検年月日	平成 27 年 12 月 28	機種名	ONW-10	製造機番	1241
設置場所				TEL：	049-227-6501
設置時期	平成 18 年 11 月 9 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☐	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.50	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	92%	流量:	0.79 L/min
					圧力:	0.08~0.15 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☐	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☐	水漏れパッキン・ホース・パッキン	
内部	正常	☒	清掃	☐	シーリング	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	有償で交換する(24,000円/個別) 洗浄用は、ニスト(株)様より ご提供頂いております。
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
吸盤	交換 ☒	3個	

※本製品は平成21年8月に製造販売を終了しており、修理対応期間は平成28年8月までとさせていただきます。
何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

平成 年 月 日

ご署名 西野 松 栄 子

印

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2015/12/28 作業者 西野
ONW-10機番: 1241 PSA機番: SPS- 客先: 栄クリニック 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-1247)	合/否	合
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	合
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	合
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	合
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	合
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	合
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	合
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (92 %)	合/否	合
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.79 L/min)	合/否	合
PSA圧力の確認 (0.078 Mpa) ~ (0.150 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	合
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	合
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	合
ドレンチューブは接続したか	合/否	合
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	合
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	合
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	合
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	合
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	合
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	合
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	合
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	合
インジケータの変色は良好か	合/否	合

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

142-1 14mm 515