

装置情報		戻る
型式	OEO-1000S	
製造番号	300215	
プログラマー	Ver. 0204/1028V	
納入年月	14/02/27	
前回定期点検	15/08/19	
交換後運転回数	482	
運転回数(消毒)	2319	
運転回数(消毒+アル)	2329	
運転回数(リ-2f+2f)		
運転回数(自己洗浄)	493	
運転回数(FA3-8単位)	657	
運転回数(17単位)	8	

消毒履歴		戻る
Date	Time	オゾン濃度
1	10/19 09:03	0.78
2	10/19 09:33	0.69
3	10/19 10:19	0.69
4	10/19 09:11	0.69
5	10/19 10:19	0.71
6	10/19 11:21	0.71
7	10/19 12:48	0.65
8		
9		
10		
11		

0.65ppmと若干濃度が低い。

⇒10/19に3回異常報告あり。

異常履歴		消去	Ct
Date	Time	Error	
10/19	12:26	オゾン水生成注意 (E:110)	000000
10/19	12:30	オゾン水生成異常 (E:207)	000000
10/19	12:37	オゾン水生成注意 (E:110)	000000

↓異常発生時のパルスは正常

↓水温は27℃と高かった。

時刻記録	14:34	前	次
(開始から3分以上経過のこと)			
オゾン水濃度計動作確認			
パルス数 3 (空気測定値)			
オゾンセンサ動作確認			
オゾンを当てる			
数値が上がリ、ALLのみ消えること			
出力値	0	ALL	ALE

給水、消毒槽チェック		前
自動給水	L, H, HHの順にON?	
SV16確認	72L逆流なし?	HH
水温確認	27℃実水温+2℃~4℃?	H
TH16=ON?	TH16 ←ON?	L
排水	排水されるか?	
AP1 SV8 SV9 SV12		
SV4 SV5 閉 P2 SV16		終了

↓現場で試運転して問題なし。

↓試運転後では水温が22℃に下がった。

消毒履歴		戻る
Date	Time	オゾン濃度
1	10/19 09:11	0.69
2	10/19 10:19	0.71
3	10/19 11:21	0.71
4	10/19 12:48	0.65
5	10/19 14:48	0.67
6		
7		
8		
9		
10		
11		

給水、消毒槽チェック		前
自動給水	L, H, HHの順にON?	
SV16確認	72L逆流なし?	HH
水温確認	22℃実水温+2℃~4℃?	H
TH16=ON?	TH16 ←ON?	L
排水	排水されるか?	
AP1 SV8 SV9 SV12		
SV4 SV5 閉 P2 SV16		終了