

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	300167	
作業年月日	平成 27 年 7 月 24 日		作業時間	Hr	
顧客名	佐野医師会病院		TEL	0283-22-5358	
所在地	栃木県佐野市植上町1677		担当	柳沢	様
販売店	ニスコ株式会社		担当	中山	様
納入年月日	平成 26 年 1 月 16 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒			修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

運転終了後、排水エラーの発報 (E:111) 排水注意

不具合原因、作業内容

給水及び排水フィルターの交換作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 289
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

故障していた。排水に排水エラーの交換をお願いします。
有償対応いたします。(要相談)

装置 情報	交換後運転回数	855	更新（リセット）実施	未実施	殺菌	1275	殺菌+7L	1111
	リークチェック	0	自己洗浄	439	アルコール単独	32	エア単独	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		内視鏡接続コネクタ		☐	
排水栓		☐		吸盤		☐	
オゾン水濃度計		☐		給水用フィルター		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		排水用フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

27 年 7 月 24 日

柳沢 R.



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

