

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-53686

No. 151111

配布先	客先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
環営	環品	顧客名	のがたクリニック 様	機番	300299
		所在地	東京都中野区野方 1-40-1	納入日	平成 26 年 6 月 4 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成 27 年 10 月 29 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 27 年 11 月 5 日

修理依頼・不具合内容

- ・タッチパネルが勝手に再起動する
- ・停電エラーで運転できない

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

異常が再現することを確認しました。
コントロール基板の故障が原因で、基板～タッチパネル間の電気信号が不安定な状態でした。
このため 運転前の待機状態や運転中に信号が途絶えて再起動等の不具合が発生しました。

コントロール基板とタッチパネルを交換して復旧しました。

写真：コントロール基板、タッチパネル



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：運転プログラムバージョンアップ：Ver. 0204/02BV⇒Ver. 0207/T03C
※変更点：オゾン水濃度計のウォーミングアップ条件の見直し。操作上の変更はありません
- 3：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.69ppm・・・正常
- 4：運転確認・・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	タッチパネル	1 個	カラー型

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

承認



審査



作成

H27. 11. 11

中澤