

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151023

発行日 平成 27年 10月 23日

|       |                                                                                 |           |                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                            | 製造番号:     | 300402                                                |
| 作業年月日 | 平成27年 10月23日                                                                    | 作業時間:     | 1.5 Hr                                                |
| 顧客名   | えびすいクリニック 様                                                                     | TEL:      | 029-295-8881                                          |
| 所在地   | 茨城県那珂市竹ノ内2-14-6                                                                 | 担当        | 様                                                     |
| 納入年月日 | 平成 26年 10月16日                                                                   | 保証期間      | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1 年 / 回目 | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>                              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H27年 保守点検

酸素圧力異常2 (E200) 4/0.10/1.10/16  
排水異常2 (E402) 10/3

不具合原因、作業内容

運転プログラムバージョンアップ 0207/T02C ; 濃度計ウォーミングアップ時間の見直し  
お客様の操作上の変更はありません

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ホンパ残 3MPa (黄)               | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 453 |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ※シャワー実施                     | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0.68ppm  |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> E付       |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

|      |              |                  |            |            |
|------|--------------|------------------|------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 485 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 177    | 消毒+7L: 308 |
|      | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 255        | アルコール単独: 1 | エア単独: 0    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称               | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; 水槽側 ← 新型交換済み |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; チューブ側        |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                      |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                      |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                      |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27年 10月 23日

医療法人 えびすいクリニック

ご署名

理事長 胡 野 都 朗 印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者



Ver 3.0