

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号 : 300468
作業年月日	平成 27 年 12 月 10 日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	若葉病院		TEL : 049-283-3633
所在地	埼玉県坂戸市戸宮609番地		担当 様
販売店	ニスコ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 26 年 12 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検ソール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8月、9月 E:110 オゾン水生成注意喚起

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒
 トレー 正常 ☒
 消毒槽コネクタ 正常 ☒

0~1

清掃 ☐

消毒槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 消毒チューブ類 正常 ☒

バルブ数 609

履歴 0.70 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。今回はサ・セとあります。次回より ¥72,700(税別)の
 給水バルブ・排水バルブに替わります。

装置 情報	交換後運転回数 : 358	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 : 181	消毒+アル : 217
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 86	アルコール単独 : 5	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	給水バルブ		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

木公田

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

西野