

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100684
作業年月日	平成 27 年 12 月 18 日		作業時間:	Hr
顧客名	はやし内科クリニック 様		TEL:	042-423-0452
所在地	和歌山県和歌山市 6-6-10		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー異常が頻りに発生して止まってしまう。

不具合原因、作業内容

E:205 オゾン発生異常

E:214 レベルセンサ異常

HH水位センサの検知の可能性

オゾン水の生成・殺菌槽の洗浄・脱気フィルタ交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 5x9
オゾンセンサ	正常 ☒ 0.1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今回のエラー異常が確認出来ず原因不明。洗浄・水位センサーの誤検知の可能性
があるが様子を見て頂ければと思います。

装置情報	交換後運転回数: 432	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 432	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 375	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
アルコール洗浄剤		☒	1コ			☐	
殺菌槽洗浄剤		☒	2コ			☐	
脱気フィルタ		☒	1コ			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 12 月 18 日

ご署名 林 順平

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

