

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100671
作業年月日	平成 28 年 1 月 21 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	東郷クリニック	TEL: 042-670-7727
所在地	東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢ビル4F	担当 様
販売店	株式会社メディセオ	担当 様
納入年月日	平成 25 年 2 月 4 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 580
オゾンセンサ 正常 ☒ 0.1	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
殺菌槽の交換が必要と判断。インシュロックで固定されているため、
特に異音はありませんでした。給水ホース交換（¥5,600+消費税）

装置 情報	交換後運転回数: 256	更新（リセット） ☒ （実施）・未実施	殺菌: 86%	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 73%	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	吸着剤		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	給水ホース	有償+¥5,600	☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 古 謝 子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
古 謝 子	古 謝 子