

スコープ 修理報告書 服部内科医院(茨城県利根町)
H28 4/8メンテ時撮影

FUJIFILM		修理報告書		修理元: 富士フイルム オプティクス株式会社 茨城県常陸大宮市東野4112	
お客様名				修理受付番号	
服部内科医院				Q885200053	
修理受付No. E2014050061-1				第5区分責任技術者 藤田 浩明	
修理受付日 2014/5/7				第2区分責任技術者 藤田 浩明	
製品型番 EG-530NW		BODY No. 1G366A960		SC修理No. 3781587-1	
製品区分				設置日 2010/03/24 (経過:4年2ヶ月)	
営業特記				特約店名 茨城サービスセンター	
◇ご指摘内容				特約店担当者名 中村 匡利	
スコープの先端が白く変色し固くなっている。オゾン水の洗浄機を使っているがオゾン水が原因で固くないか水切れが悪くなってきた				製品特記	
気密検査 OK		気密検査 OK		保守契約の種類	
有 (C)					
◇解析(部位と現象)				◇原因	
1 挿入軟性部 変色				1	
2 挿入軟性部 硬化 は再現しませんでした				2	
3 送気送水管路 水切れ不良 は再現しませんでした				3	
4 先端LGレンズ 水残り				4	
5 鉗子ファンネル/先端側 気密不良				5	
6 鉗子ファンネル/内面 剥がれ				6	
7 先端対物レンズ 接着剤剥がれ				7	
8 先端LGレンズ 接着剤剥がれ				8	
9				9	
10				10	
◇修理内容				◇お客様への連絡事項 E2014050061-	
1 挿入軟性部交換・BSA/FCT/AWT/RBS含む				アングルUP側ストッパー改良品に交換実施・挿入軟性部が硬くなったとのこと指摘については、特	
2 先端レンズ 部再接着				に問題なきレベルと判断致しますが、ご指	
3 ESS ストップ交換				摘があることから挿入軟性部交換を行います。	
4 検査				・水切れ性能に関しては、他同機種と比較しても問題なきレベルと判断致します。	
5				別途、LGレンズ上に水が残る現象が確認されましたので、これに関しては先端レンズの接着剤剥	
6				正を行います。	
7					
8					
9					
10					
◇修理完了品質検査					
当修理品は修理後、映像検査・性能検査を実施し、電子内視鏡製品 EG-530NW の修理品の品					
質規格に合格したことを証明いたします					

