

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様用

お客様	名前 川崎ハイパー歯科	機種 14090182	点検実施日 2019.4.10	ご承認印 藤尾
住所 新入場所	川崎市川崎区宮前町8-1	運転時間 4606回	点検実施者 エムサービス(株) 金子 モリタ担当部署 医療	

計装(安全)

- ドア
 - フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ピス・ナット・ボーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット作動確認
 - ドアロックユニット作動確認
 - 箱板のキズ・汚れ
- 缶体
 - 削れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - 清菌温度センサの汚れ
 - 网カゴの破損・汚れ
 - 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

- 配管系
 - フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
 - シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
 - 給気弁の作動状態・漏れ
 - 排蒸弁の作動状態・漏れ
 - 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
 - 清菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ストレーナーの汚れ
 - 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
 - 安全弁(減菌室)の漏れ
 - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 - ダンプナーの漏れ・溶接割れ
 - 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
 - ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- 真空ポンプ
 - 水漏れ・異常音の確認
 - 真空到達度
- 給水タンク
 - 給水タンクの損傷・漏れ
 - 下部給水弁の漏れ
 - 蓋・取っ手の損傷・割れ
 - フロートスイッチの作動状態・汚れ
- 排水タンク
 - タンクの漏れ・漏れ
 - フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ドアパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無
- 消耗品
 - ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - エアーフィルターのつまり、汚れ
- 性能評価
 - B&Dテスト実施
 - ケミカルインジケーターによる判定
 - リークチェック
 - キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

交換部品(名称・型式)	数量
トライパッキン	/
バターリアブルワー	/



機械事業本部営業部 営業サービスセンター

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新町10-6

TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030