

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-1112

No. 150418

配布先	納入先	新鋭工業（株）名古屋支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	静岡県沼津市根古屋307-1	機番	001287
環営	ユーザー名	萩野クリニック 様	納入日	平成17年5月30日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日	平成28年2月25日	発送日	平成28年4月14日
計	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・異常内容

終了時のブザー音が通常と違う。 各部点検、内部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械内部の排水系統が詰まっており、水槽～排水系統に若干水が残っている状態でした。この残水を水位センサが検知して「ピー」音が鳴りながら排水ポンプが動いたため通常とは異なるタイミングでブザー音が鳴りました。部品交換と内部清掃で復旧しました。

No1～3：水位センサ、配管チューブ

No4～6：定期交換部品



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- 運転プログラム Ver 8⇒10書換え
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
- オゾン水濃度測定：0.48～0.57 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：92.6% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.081～0.147MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：1153

交換部品

承認
安 16.4.18 田
審査
中 16.4.18 澤
作成
H28.4.18 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
1	水位レベルセンサー	1式	H、HHは今回無償
2	配管チューブ、パッキン		
3	フタスプリング		
4～6	定期交換部品	1式	SPS-11958
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		