

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 10日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 12 月 7 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	ルミネ千住歯科クリニック 様 TEL: 03-3888-0648
所在地	東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店9F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100123	運転回数: 1066 (総回数: 2219)	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー2 洗浄槽満水			
原因			
・ 不具合、欠損箇所は特になかったが、排水ポンプのエア噛みと推定			
処置、作業内容			
・ 排水ラインの配管チーズを持ち上げ、排水ポンプにエア噛みしないよう変更			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

東京都足立区千住旭町42-2ルミネ北千住店9F
医療法人社団双樹会
ルミネ千住歯科クリニック
TEL 03-3888-0648

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '18/12/10 元森	環PJ '18/12/10 関口