

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIアグリテック用

お客様	名称	あいこわ歯科医院 様	製造番号	14070149	点検実施日	2019.2.7.	ご承認印	
	住所	中央区湊3-18-16 東海ビル2F	連転回数	1069	点検実施者	大山		
	納入場所		サービス形態	スポット点検	モリタ担当部署	東林営業科南品営業科		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ 交換
- ☒ エアフィルターつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【     】

運転確認

☑ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

B 作業報告書

お客様 あいさわ歯科医院 様	ご承認印 (相澤)
住所 中央区漆3-18-16 東海ビル2F	
TEL 03-6280-5080	営業 1059 回
機種 BC-17	別機 14070149
継続 ☒	無料 ☒
取扱業者名 (株)IHIフクリック 様	ご担当者 松下 様

ご依頼内容・現象

点検表に基づく点検

原因

処置

ドクパッキンの交換。
バキューム、B&Dテスト確認。
その他問題ありません。

最終確認チェック

☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり

別紙添付 ☐あり ☐なし

部位

作業日 2019年2月7日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 点検 ☒ 3 点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☐ 9 点検 ☒ (摘要)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 点検 ☒ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 ☐ 管 ☐ 非管 ☐

作業区分

00 製品搬入 ☐ 10 搬入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 コール ☐ 60 撤去修設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☒

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドクパッキン	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

部署長

検印

人力

納品書

サレシセンター

実施者

TEL

首利園C

大山

メモ

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒397-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC
 秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 兵庫SC 長崎SC
 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC
 那覇SC 北九州SC 東京SC 京都SC 北九州SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 801025

左記作業をおこないませんので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料金内訳

13 A

部品代

14 B

技術料等

15

16

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書No.