

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	北戸うちほら内科クリニック 様			機種	ONW-10B
所在地	〒 茨城県北戸市中原町西135 TEL 029-259-1710 1オシ北戸内原内			機番	001445
販売店				納品日	2008.5.16
				依頼日	2016.4.7
作業者	西野	作業時間	1.5 点	作業日	2016.4.11

修理依頼・苦情内容

給水口からの水漏れ

不具合原因(故障箇所)と処理内容

給水栓及び給水ホース接続口からの水漏れ

給水ホース
給水栓ニール(とれ付) } の交換

※ニールニール補強
(トリー吸盤
レジン増設)

上記部分交換により修理

¥15,000- (税別) ティーラ-アルスサ様へご請求

(今回限り特価対応)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
PT17-1-2	給水ホース	1 本	
PT122-4TVX-16	給水栓ニール	1 コ	
-	吸盤	1 コ	

年 月 日

ご署名 浅香 紀子

印

水戸うちばり内科クリニック御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 戸野

点検年月日	平成28年 4月11日	機種名	ONW-10B	製造機番	1885
設置場所				TEL	029-259-1700
設置時期	2008.5.16	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☐	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度： 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素配管	正常 ☒			
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内部	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	一個	修理(触媒側)同時実施により ¥34,000(税別)にて完了。

年 月 日

ご署名 浅香 純子

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10B 作業チェックリスト

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2018 年 4 月 11 日 作業者 石野

ONW-10B 機番: 1885

客先: 水戸市はら内街121-1 様

定期交換部品	
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 ☐ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 ☐ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 ☐ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 ☐ 否
酸素ガス配管確認	
ボンベレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか	☒ 合 ☐ 否
ボンベレギュレータの二次側圧力は正常か(0.21~0.29Mpa)	☒ 合 ☐ 否
酸素ボンベ~ONWまでの配管に漏れは無い	☒ 合 ☐ 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (L/min)	☒ 合 ☐ 否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 ☐ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 ☐ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 ☐ 否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 ☐ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 ☐ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 ☐ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 ☐ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 ☐ 否
確認試験	
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 ☐ 否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	☒ 合 ☐ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 ☐ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 ☐ 否
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)	☒ 合 ☐ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)