

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300558
作業年月日	平成 28 年 4 月 20 日	作業時間： 15 Hr
顧客名	吉祥寺あさひ病院 様	TEL： 0422-22-1120
所在地	東京都武蔵野市吉祥寺本町1-30-12	ご担当 様
販売店	有限会社高安医科	ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

清掃 ☐

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
マニホールド周辺チューブ	正常	☒

バルブ数 585

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありせん。今日は無償で修理。次回に有償で70,000(税別)で修理する。

装置 情報	交換後運転回数： 367	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 36x
	リークチェック： 0	自己洗浄： 192	7Lコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 4 月 20 日

ご署名

佐藤 大

佐藤 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者



Ver.3.1