

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

|       |                                                                                                                               |                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                    | 製造番号： 300299                    |
| 作業年月日 | 平成 28 年 6 月 30 日                                                                                                              | 作業時間： 2.0 Hr                    |
| 顧客名   | のがたクリニック 様                                                                                                                    | TEL： 03-3389-2201               |
| 所在地   | 東京都中野区野方1-40-1 新住所：中野区大和町1-4-2                                                                                                | ご担当 様                           |
| 販売店   |                                                                                                                               | ご担当 様                           |
| 納入年月日 | 平成 26 年 6 月 4 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                         | 付属品                             |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |
| 出張/引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                                        | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス実施  
新設作業（給排水取付）

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 677    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0.1                         | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。  
仮住所に新設しました。中野区大和町 1-4-2 白鷺ビル 3F（H28.7月頃まで）

|          |              |                                                |            |               |
|----------|--------------|------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 356 | 更新（ <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒： 633 | 殺菌/消毒+7L： 257 |
|          | リークチェック： 1   | 自己洗浄： 165                                      | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

大塚

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

