

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160712

発行日: 平成28年 7 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300348
作業年月日	平成 28 年 7 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	高沢胃腸科外科 様		TEL: 0276-45-1133
所在地	群馬県太田市新井町567-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ n 回数 713
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 205	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 96	殺菌/消毒+7分: 274
	リークチェック: 0	自己洗浄: 226	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ; 水槽側		☒	
ポン水濃度計		☒		接続コネクタ; チューブ側		☒	
ポン水濃度計用フィルター		☒				☒	
オゾンセンサー		☒				☒	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 7 月 12 日

ご署名

高沢 三好子

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	小山