

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100588
作業年月日	平成 28 年 8 月 3 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	飯能市東吾野医療介護センター 様	TEL： 042-978-2000
所在地	埼玉県飯能市大字虎秀25-1	ご担当 様
販売店	日本メガケア株式会社	ご担当 様
納入年月日	平成 24 年 10 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検作業実施・リークチェック説明 (エール・タケお渡し)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 478
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.69 ppm	
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はなし。

装置 情報	交換後運転回数： 113	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 100	殺菌/消毒+アル： 279
	リークチェック： 18	自己洗浄： 162	アルコール単独： 2	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	バルブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

餅田良治

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者



Ver.3.1