

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号： 100215
作業年月日	平成 28 年 6 月 9 日	作業時間： Hr
顧客名	岡部クリニック 様	TEL： 042-771-3387
所在地	神奈川県相模原市緑区橋本3-15-4	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・ <u>引取</u>	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容

タッチパネルが起動しない（画面真っ暗）
定期保守点検およびオーバーホール依頼

不具合原因、作業内容

作業が遅れまして大変申し訳ありませんでした。
不具合部品と劣化した部品を交換して復旧いたしました。

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 611
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 交換	殺菌チューブ類	正常 <input type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。 交換部品の詳細は別紙「100215号 工事写真」をご参照ください。

装置情報	交換後運転回数： 0	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 0	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	見積部品No	交換	数量	交換部品名称	見積部品No	交換	数量
定期交換部品	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	マニホールド 電磁弁	8	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
タッチパネル	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	酸素、給水電磁弁	9~10	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
メインポンプ、排水ポンプ	3~4	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	アルコールライン電磁弁	11	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
エアポンプ	5	<input checked="" type="checkbox"/>	1 台	配管パッキン、フタパッキン	12	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
排気ファン	6	<input checked="" type="checkbox"/>	1 台	リークチェック配管	13	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
ドレンバルブ ASSY	7	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	トレイ ASSY	14	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式

機械受付日：平成 27 年 9 月 28 日
機械出荷日：平成 28 年 6 月 9 日

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者

1~2: 定期交換部品、タッチパネル (コントロール基板交換、バリスタ取付含む)



3~7: メインポンプ、排水ポンプ、排気ファン、ドレンバルブASSY(DCモータ、カム含む)



8~13: マニホールド電磁弁、酸素電磁弁、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁
配管パッキン、フタパッキン、リークチェック配管



※トレイASSYは写真なし