

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 8月 22日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 8 月 22 日 作業時間: Hr
顧客名	聖路加国際病院 歯科口腔外科外来 TEL: 03-3541-5151
所在地	東京都中央区明石町9-1 ご担当 高橋 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100149	運転回数: 1296	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー7 循環水圧低下			
原因			
・ 循環ポンプ破損 (焼き付きによる摩耗)			
処置、作業内容			
・ 循環ポンプの交換 (対策品)			
・ 定期メンテナンスの実施			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1	保守点検に含みます	
2	HEPAフィルター		1		
3	プレフィルター		1		
4	ポンプチューブ (洗剤・仕上剤)		2		
5	ドアパッキン		1セット		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 5 日

ご署名 小澤 靖弘



修理業者

株式会社IHIIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-8528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ 19/08/22 富田	環PJ 19/08/22 安田

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称	聖路加国際病院	製造番号	100149	点検実施日	2019年8月22日	ご承認印	
	住所	東京都中央区明石町9-1	運転回数	1296	点検実施者	IHIアグリテック 安田		
	納入場所	歯科口腔外科外来	サービス形態	定期メンテナンス	モリタ担当	モリタ東京本社		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷


消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

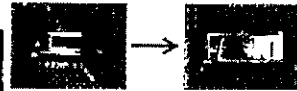

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ ポンプチューブ	1
・仕上剤ポンプ ポンプチューブ	1
・ドアパッキン一式	1
・HEPAフィルタ	1
・プレフィルタ	1
・循環ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030