

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 9月 25日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 9 月 17 日 作業時間： Hr
顧客名	ASAHIデンタルオフィス 様 TEL： 03-3226-0648
所在地	東京都新宿区舟町7 ロクサンビル 2F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 2 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100070	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー8 洗剤供給異常			
原因			
・ 洗剤流量計の固着による洗剤供給不足			
※使用期限の切れた洗剤の使用、機械の運転間隔が開いたことなどが原因と推測されます			
処置、作業内容			
・ 洗剤（仕上剤）流量計の交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤・仕上剤流量計		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

朝日

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者