

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019年12月24日	【対応日】	2019年12月25日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ユーザー	☐ ディーラー(担当者: ケー・オー・城南 岡村) ☐ その他()	
【所在地&ユーザー名】	木村歯科医院 東京都世田谷区		

案件No. 19177

電話受付: 廣瀬

現地対応: 廣瀬

送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 14060107)

【症状・エラーコード】
 エラー8 循環水圧低下

【対応方法】
☐ 預かり修理(代替機No.)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他()

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☒ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☒ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☒ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☒ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 ・洗浄工程の最初だけエラー発生、以降は出ない。
 ・上記から、圧上げ側の漏れ(槽内)と想定→ボルト締め
 ・ゴムパッキン劣化→交換、排水フィルター劣化→交換。