

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-53848

No. 160914

納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿			機種	ONW-10B
所在地	東京都杉並区高井戸西 2-9-7			機番	001688
ユーザー名	屠内科クリニック 様			納入日	平成 21 年 04 月 24 日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 28 年 03 月 22 日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成 28 年 09 月 09 日

不具合/依頼内容

水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプ出口側～水槽入口のチューブに亀裂が発生し、そこから水が漏れました。
劣化したチューブとパッキンを
交換して復旧しました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. 酸素流量測定：0.81L/min・・・正常
3. オゾン水濃度測定：0.43～0.58 mg/L・・・正常
4. 運転確認・・・異常なし。 インジケータ変色・・・異常なし
5. 運転カウンタ：3313

交換部品

No.	部品名称	数量	備考
1	配管チューブ、パッキン	1 式	
	・ P-1 出口チューブ		
	・ P-2 出口チューブ		
	・ 排水シリコンチューブ		
	・ 給水電磁弁入口側パッキン		
2	オゾン分解触媒	1 個	※新鋭工業殿にて作業実施

承認



審査



作成

H28. 9. 14

中澤