

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 安 藤



点検年月日	平成 28年 12月 2日	機種名	ONW-10	製造機番	001225
設置場所				TEL :	048-982-6266
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	シヤシタ 様

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 : 0.4	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 : 92.3 %	流量 : 0.8 / L/min	圧力 : 0.093 ~ 0.158 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	2年目点検 (岡山機)
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

28年12月2日

埼玉県吉川市栄町88

ご署名 医療法人 相羽医院

相羽直人

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 相羽直人