

点検確認書

点検担当者: 西野

点検年月日	平成28年10月24日	機種名	ONW-10	製造機番	1557
設置場所	検査室			TEL	084-945-7155
設置時期	平成20年9月2日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	92%	流量:	0.76 L/min
					圧力:	0.082~0.180 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	定期メンテナンス実施
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
吸盤	交換 ☒	3個	
	交換 ☐		

年 月 日

ご署名 土井義之

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部日付: 1128.10.28 作業者 和の
ONW-10機番: 1557 PSA機番: SPS- 客先: 工井医院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内) -0.002	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (92 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.76 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (0.082 Mpa) ~ (0.140 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	上井医院 様			機種	ONW-10
所在地	〒 111 町市多摩区菅北浦 4-11-25 TEL 044-945-7155			機番	1557
販売店				納品日	H20.9.2
				依頼日	H20.10.24
作業者	石野	作業時間	2.5 時	作業日	H20.10.24

修理依頼・苦情内容

排水ホースから水漏れがあるとの事。

不具合原因(故障箇所)と処理内容

- 。配管と排水ホースの接続口から水漏れあり。
- 。110°及び90°のジョイントで再度取付け(補強)
- 。ネジの方向を変える為、インシロクで固定。
- 。復帰確認。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

年 月 日

ご署名 上井義之

印