

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020年 2月25日

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウォッシャーディスインフェクター IC Washer |                                                                                                                                   |
| 作業年月日                      | 2020 年 2 月 21 日 作業時間: Hr                                                                                                          |
| 顧客名                        | おおかめ歯科クリニック 様 TEL: 044-946-3470                                                                                                   |
| 所在地                        | 神奈川県川崎市多摩区菅1-2-31 プラザクリエイト202-A                                                                                                   |
| 販売店                        | ご担当 様                                                                                                                             |
| 納入年月日                      | 2016 年 11 月 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品                                           |
| 作業区分                       | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                    |
| 出張・引取                      | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                  |              |            |                                                                               |
|------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 装置情報             | 製造番号: 100166 | 運転回数: 1339 | 運転回数リセット: <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴  |              |            |                                                                               |
| ・ドアが開きっぱなしの状態になる |              |            |                                                                               |
| 原因               |              |            |                                                                               |
| ・ドア開閉ワイヤー切れ      |              |            |                                                                               |
| 処置、作業内容          |              |            |                                                                               |
| ・ドア開閉部品を対策品に交換   |              |            |                                                                               |
| ・定期メンテナンス実施      |              |            |                                                                               |
| ・各種調整、清掃、運転動作確認  |              |            |                                                                               |
| 特記事項             |              |            |                                                                               |

|   | 交換部品名称     | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計           |
|---|------------|-------------|--------|----|--------------|
| 1 | ドア開閉対策部品   |             | 1式     |    |              |
| 2 | ドアバックシム    |             | 1式     |    |              |
| 3 | プレフィルタ     |             | 1      |    |              |
| 4 | HEPAフィルタ   |             | 1      |    |              |
| 5 | 洗剤ポンプチューブ  |             | 1      |    |              |
| 6 | 仕上剤ポンプチューブ |             | 1      |    |              |
| 7 |            |             |        |    |              |
|   |            | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |              |
|   |            |             | 技 術 料  |    |              |
|   |            |             | 出 張 料  |    |              |
|   |            |             | 合 計    |    | ※定期メンテナンスに含む |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 2月 25日

ご署名 平山 文裕 印

修理業者

株式会社IHアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

| 責任技術者    | 作業者      |
|----------|----------|
| 富田       | 桐野       |
| 20/02/21 | 20/02/21 |

## 器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

|     |      |                                    |        |        |            |              |      |                                                                                     |
|-----|------|------------------------------------|--------|--------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称   | おおかめ歯科クリニック 様                      | 製造番号   | 100166 | 点検<br>実施日  | 2020年2月21日   | ご承認印 |  |
|     | 住所   | 神奈川県川崎市多摩区菅1-2-31<br>プラザクリエイト202-A | 運転回数   | 1339   | 点検<br>実施者  | IHIアグリテック 桐野 |      |                                                                                     |
|     | 納入場所 | 同上                                 | サービス形態 | 定期保守点検 | モリタ<br>担当者 |              |      |                                                                                     |

## ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

## 薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

## 乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

## 配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

## ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

## 洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

## 外装・設置


- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

## 消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

## 性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

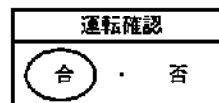

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品            | 数量 |
|-----------------|----|
| ・洗剤ポンプ DPIチューブ  | 1  |
| ・仕上剤ポンプ DPIチューブ | 1  |
| ・ドアパッキン一式       | 1  |
| ・HEPAフィルタ       | 1  |
| ・プレフィルタ         | 1  |
|                 |    |
|                 |    |

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030