

排水異常発生。

七光台外科内科 大塚様よりTELあり。12:00には正常に運転・14:30に排水異常2が出たとのこと。排水がしなくなったので、ユーザーでOED主電源をOFFにして、洗浄層に水を入れてもらが、排水が来ない状態だった。

(タッチパネル上では、消毒ボタンを押すと、排水中です。しばらくお待ち下さいというメッセージが出るとのこと。)

この対応をして欲しいとのこと訪問。先生は保証期間で2回も故障しているので、当日至急対応して欲しいと指摘された。

現場に訪問すると洗浄層の水は完全にはけており、自己洗浄・リークモード・裏モードで洗浄層に水を溜め→排水を行うが正常に作動した。

また水位センサーも正常に作動している。スコープとカンシ以外は洗っていないとのこと。

排水は塩ビ排水。シンク配管と繋がっており、シンク側で水を流すと、OED排水側の塩ビの方に水が少し逆流していた。

(排水環境があまりよくないかも知れないことを指摘。)ちなみに看護師からは、OEDとシンクでの洗浄や手洗いなど同時に使用することはないという。

排水ホースが塩ビ管に少し長めに入っていたので、排水ホースを少し短くして、排水しやすいように設置しなおした。

先生・看護師共に、同内容の不具合が2回出たことで、機械の動き方に不信を持っている。

原因をしらべて欲しいとのこと、現場にあるOEDを引き上げた。




IHI様で点検頂き、先生に報告・返却する。

往訪(野田市)七光台外科内科 OED-1000S トラブル(排水異常)

300903 OED-1000S 七光台内科外科 ナナコウダイナイカゲカ 047-127-8800 278-0051

千葉県野田市七光台4-2 イオンタウン野田メディカルモール2F 東京支店 土屋 2016/07/26

株式会社 メディセオ 柏北支店 ME杉原 保守点検(OED未契約) 2017/07/26

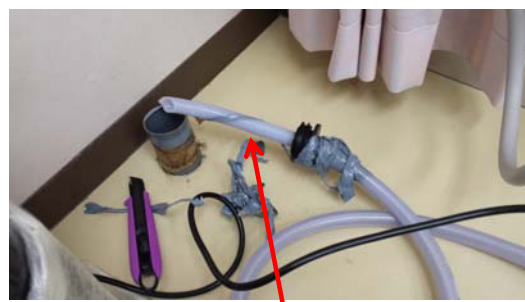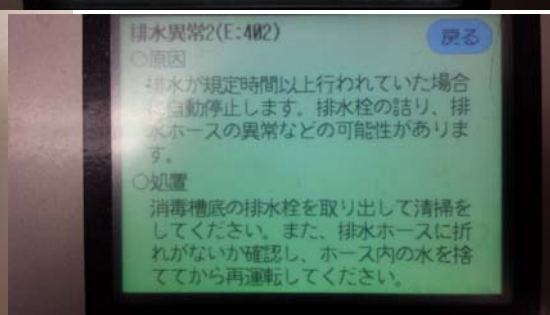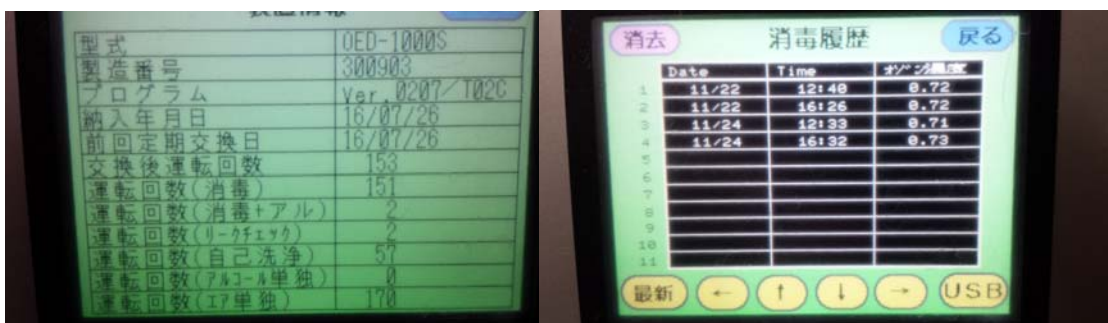

排水ホースが長すぎたので、短めにカットした。



↑ 塩ビの排水状況が悪ければ、最悪許可をもらいシンクに排水しないといけなくないかもしれない。